

B | BRAUN

Global
Product
Training



Медицинские изделия для инфузии



Принадлежности для инфузии: обзор

Инфузионная терапия

Приготовление
растворов

Мини Спайк Плюс

Транзофикс

Экомикс

Экофлак коннект

Экопин

Инфузионные системы

Стандартные
системы

Специальные
системы

Интрафикс

Эксадроп

Медификс

Дозификс

Цито-Сет

Интрапур
Инлайн

Принадлежности для
инфузии

Удлинитель
Разветвитель

Регуляторы
потока

Фильтры

Порты
Коннекторы

Заглушки
Адаптеры



Принадлежности для инфузии

Инфузионная терапия

Специальные
инфузионные системы

Эксадроп

Медификс

Дозификс

Интрапур Инлайн

Цито Сет



Medifix®

**Инфузионная система для измерения
Центрального Венозного Давления (ЦВД)**



Измерение ЦВД

Показания:

Острая/хроническая гиповолемия, например, при значительном нарушении циркуляции (потере объема); при скрытом кровотечении.

Острая/хроническая гиперволемия, например, в случае восполнения объема при длительной инфузионной терапии.

Острая/хроническая сердечная недостаточность, например при легочной эмболии или инфаркте миокарда.



Medifix®

Набор для измерения ЦВД со шкалой






Medifix®

□ Medifix® шкала манометра

- с двумя универсальными фиксирующими зажимами
- из устойчивого к повреждениям пластика
- повторно используемый

□ Medifix® система трубок


- одноразовая

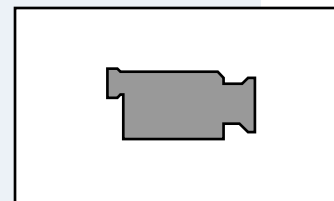

Infusion therapy 3 – from 9'40"



Медификс – система для мониторинга ЦВД

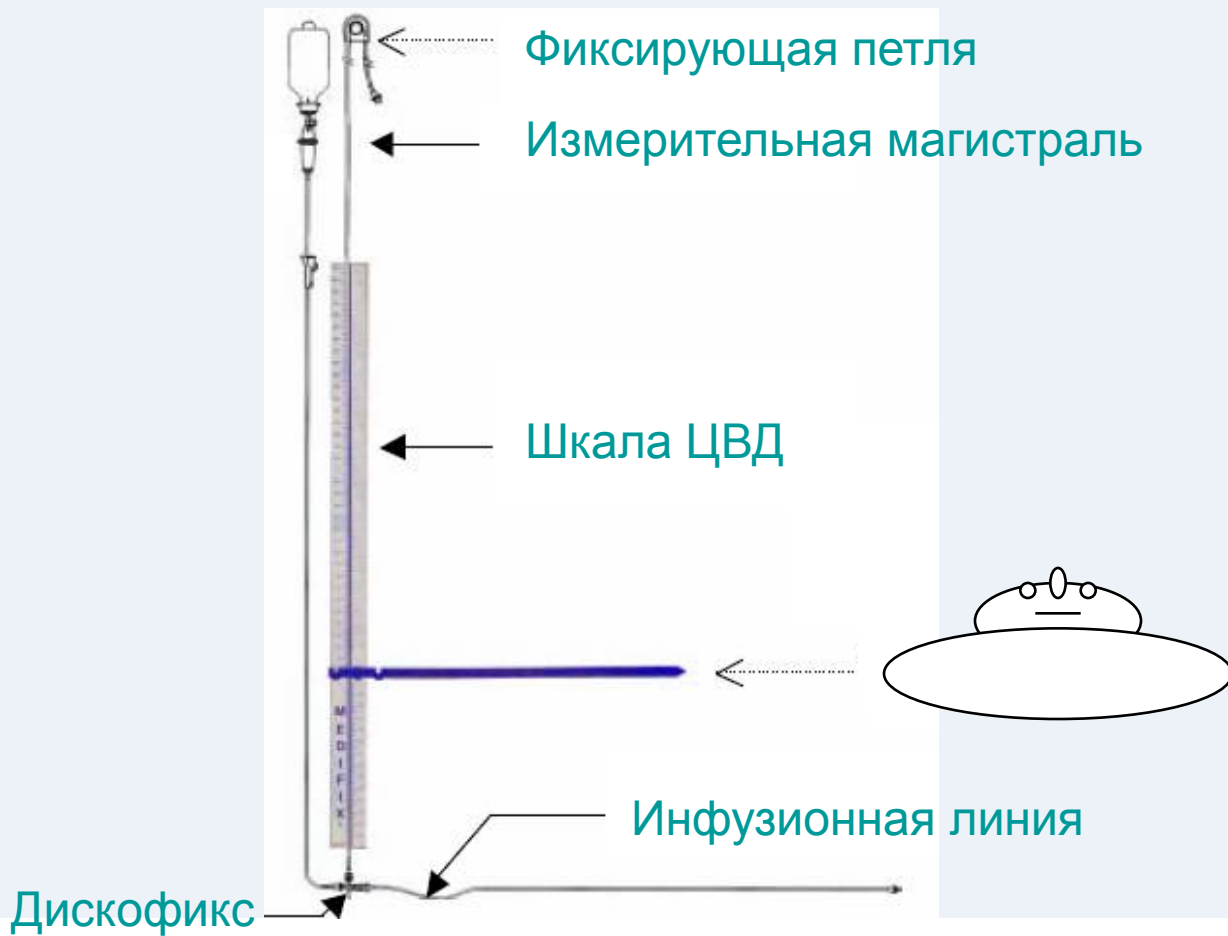



Измерение ЦВД

Считывание показаний:

Отражает скорость притока крови в правые отделы сердца.

Точное восполнение объема жидкости.

Нормальное ЦВД: от 3 до 8 см водного столба.

ЦВД выше нормы - > 8 см водного столба – сердечная недостаточность.


ЦВД ниже нормы - < 3 см водного столба – гиповолемия.



Медификс – система для мониторинга ЦВД

Интрафикс Air G

инфузионная магистраль (к пациенту)

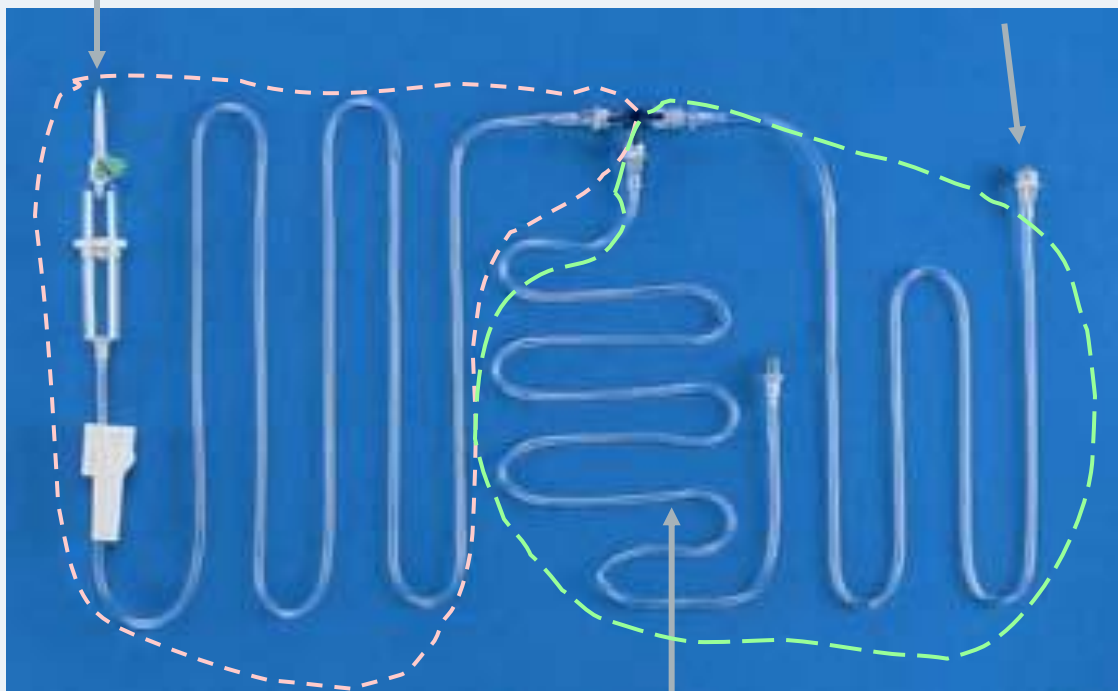


измерительная трубка с бактериальным фильтром



Медификс – система для мониторинга ЦВД


Измерительная шкала: +35 ... -15 см H₂O

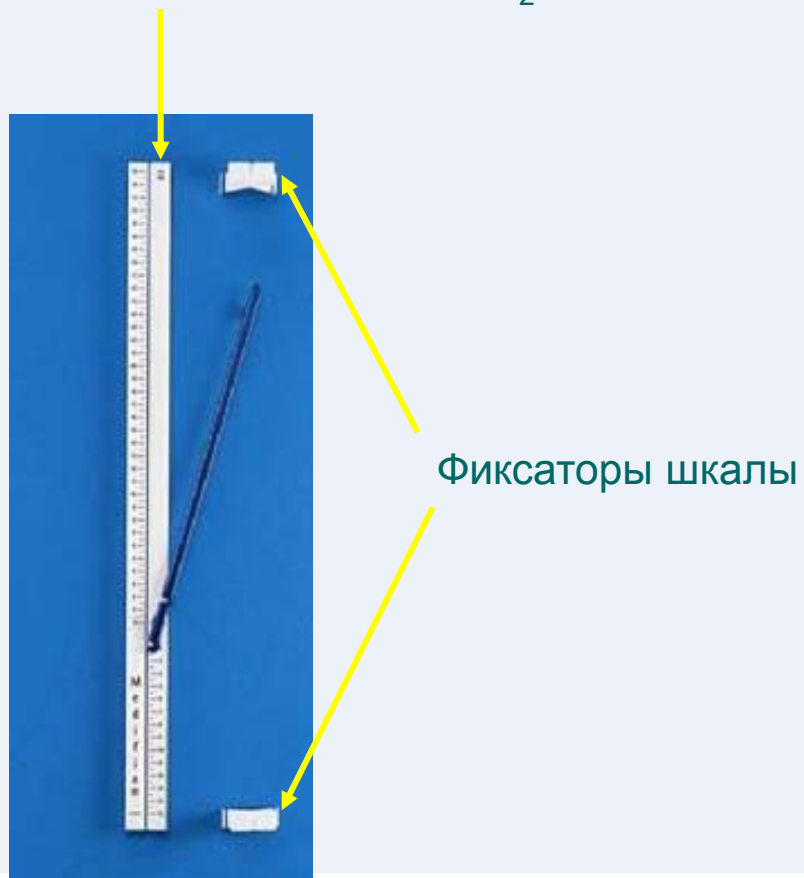



Медификс: мониторинг ЦВД


1 – заполнение измерительной трубки

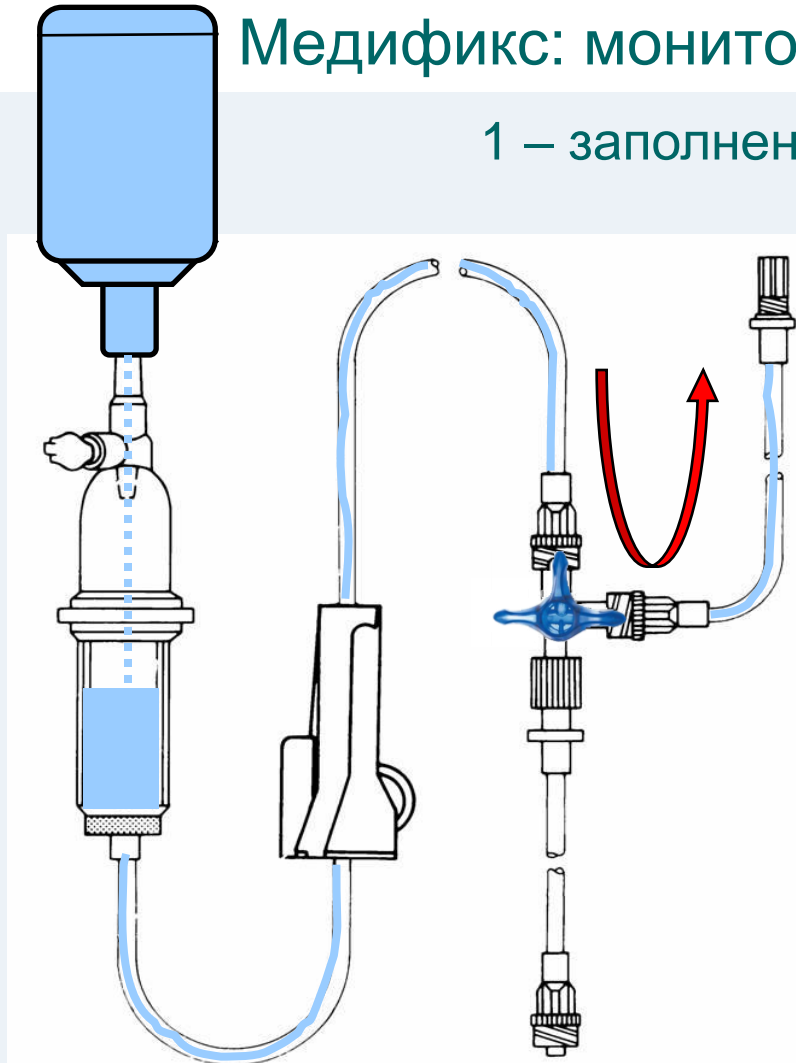



Медификс: мониторинг ЦВД


2 – заполнение инфузионной линии

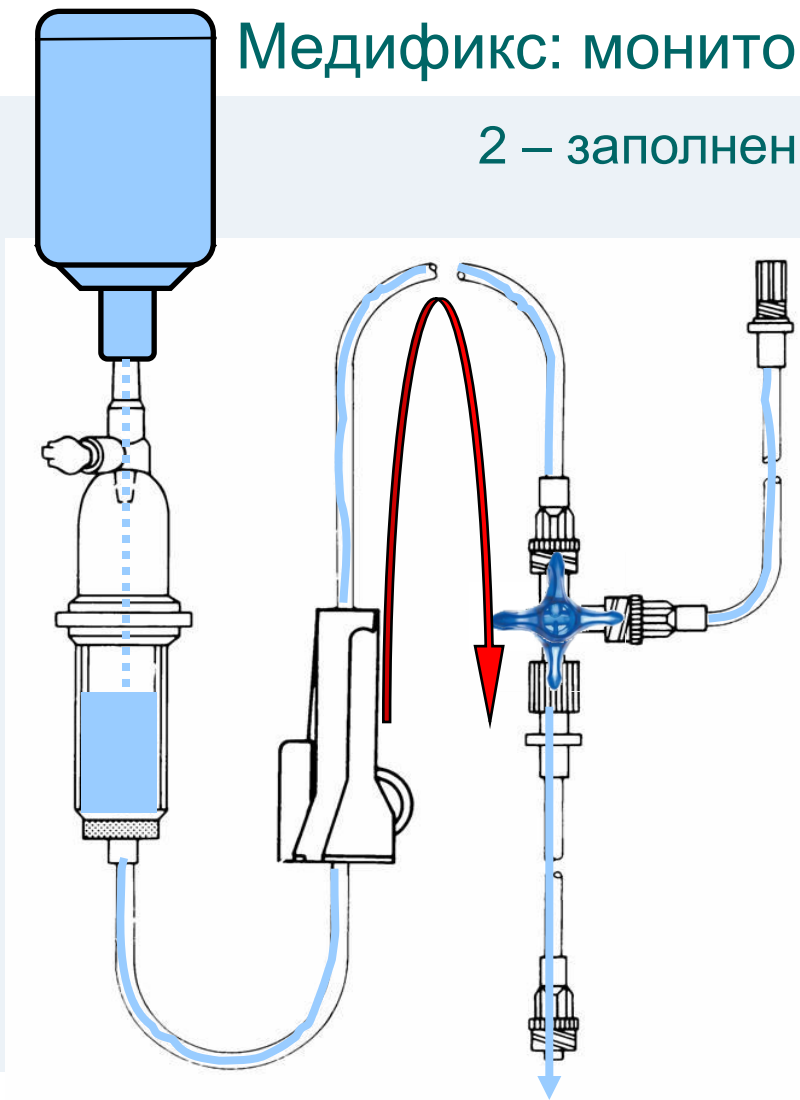



Медификс: мониторинг ЦВД


3 – измерение ЦВД

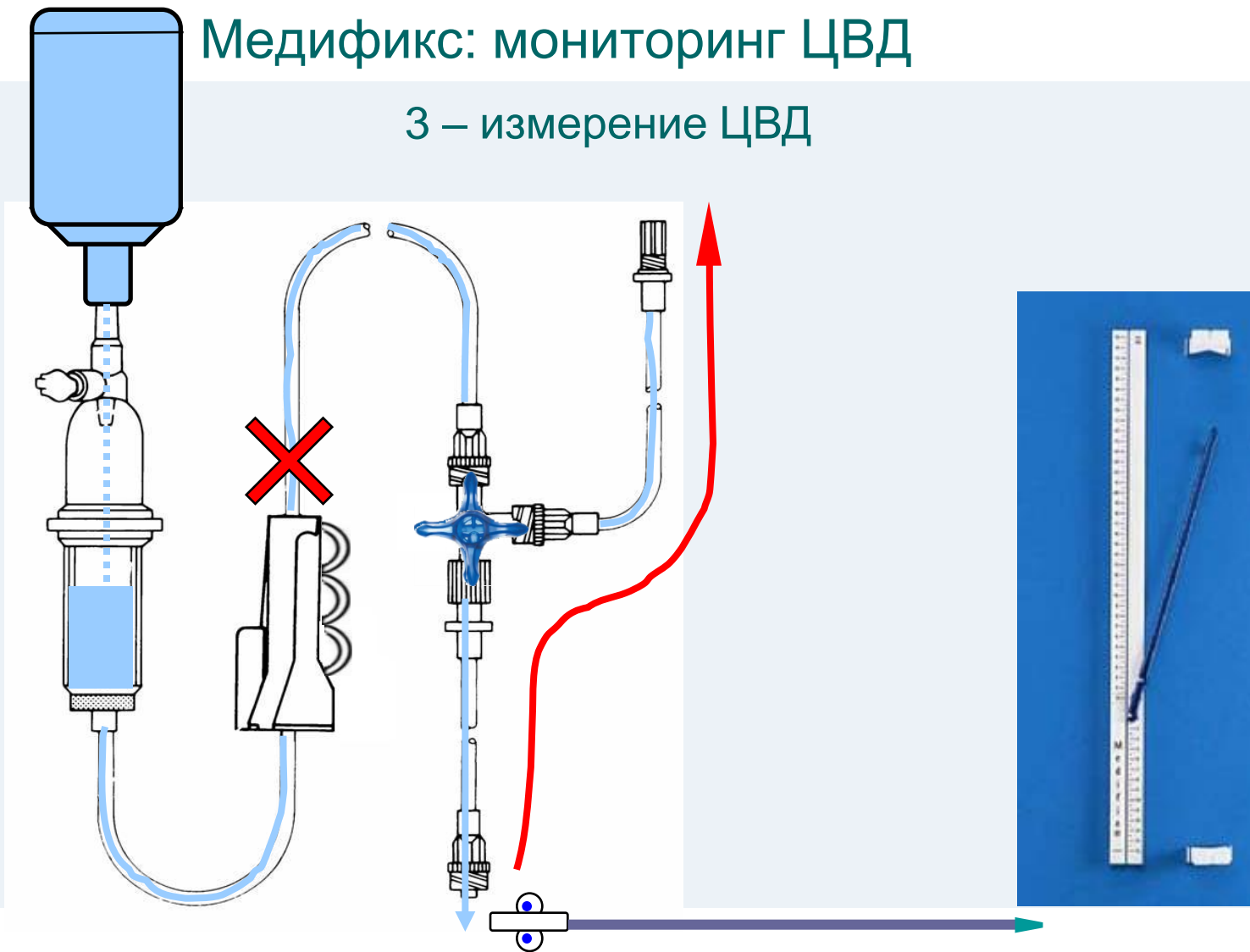



Медификс: мониторинг ЦВД

4 – возобновление инфузии

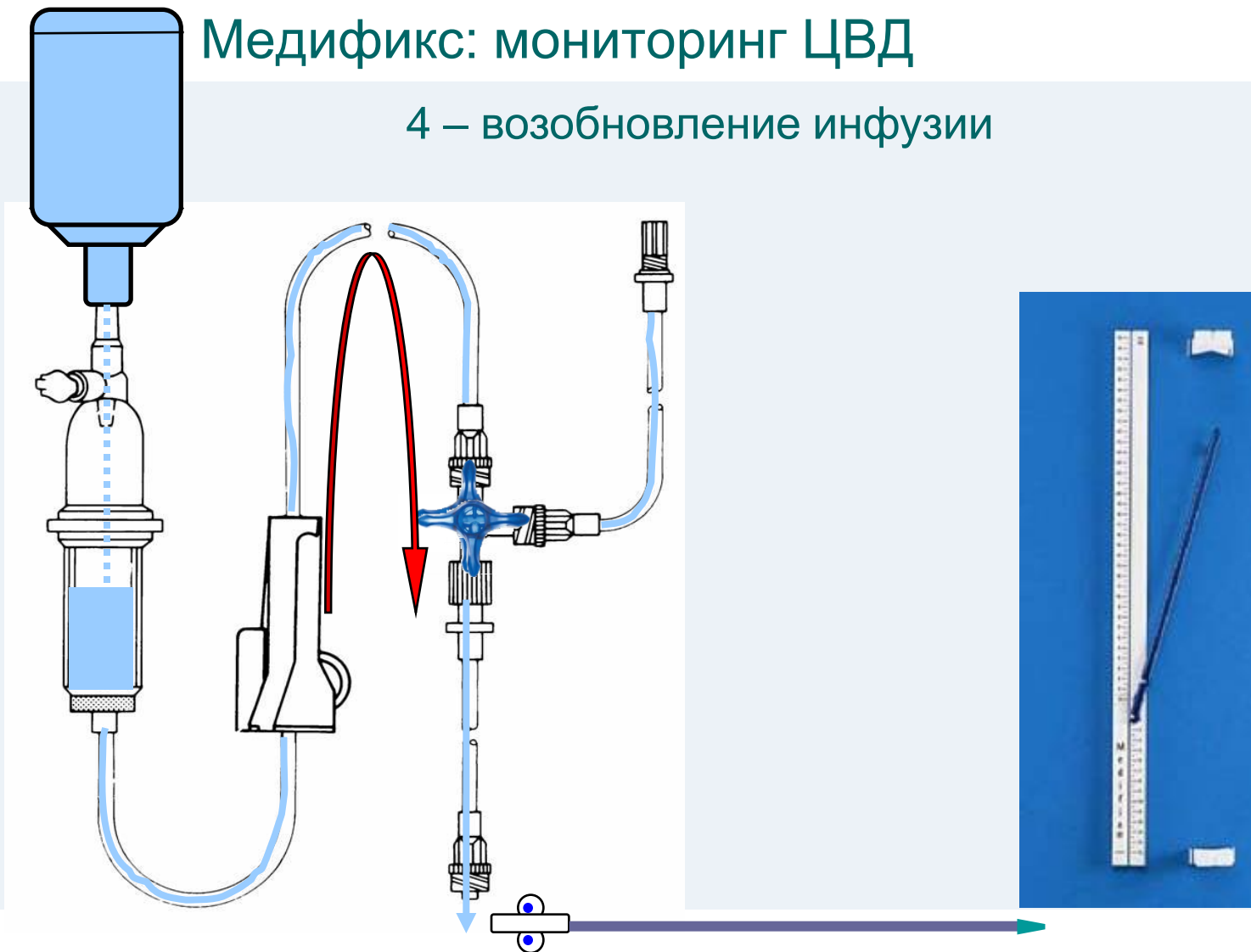



Медификс: спецификация

427 6612	Медификс система для измерения ЦВД 100 см + Интрафикс 145 см	герметичность + стерильность
427 6116	Медификс - система 100 см без системы Интрафикс	стыковка с любой системой с помощью коннектора Люэр лок – ЭКОНОМИЧНОСТЬ
427 9913	Медификс – измерительная шкала	многократное применение
427 6728	Медификс система для измерения ЦВД 180 см + Интрафикс 80 см	герметичность + стерильность
427 6108	Медификс - система 180 см без системы Интрафикс	стыковка с любой системой с помощью коннектора Люэр лок – ЭКОНОМИЧНОСТЬ
427 6620	Медификс система для измерения ЦВД 100 см + Интрафикс 80 см	герметичность + стерильность



Медификс: резюме

**МЕДИФИКС – СЕРИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВД,
ВКЛЮЧАЮЩАЯ НАБОРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ КЛИНИКО –
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ**

ЛИНЕЙКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВД:

- МНОГОРАЗОВАЯ,
- УДАРОПРОЧНАЯ,
- ОСНАЩЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ФИКСАТОРОМ
- С ДВУХСТОРОННЕЙ УСТАНОВКОЙ ПО СРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ЛИНИИ